

Ketac Cem easy mix

Cemento Ionómero de Vidrio



Ficha Técnica

■ Descripción

Cemento de Ionómero de Vidrio indicado para cementaciones definitivas, en una formula fácil de mezclar.

■ Ventajas

- Polvo con propiedades mejoradas de fluidez, que produce una mejor y reproducible dosificación, obteniendo resultados clínicos consistentes.
- Líquido para humectar el polvo que ofrece un proceso de mezcla más fácil y rápida, reduciendo la probabilidad de desperdicio del producto.
- Menor generación de polvo durante la apertura y dosificación del producto.
- Liberación de flúor superior
- Alta bio compatibilidad.
- Posee un grosor de película extremadamente fino que optimiza la adaptación y la integridad marginal.

■ Indicaciones de Uso

- Cementación de inlays, onlays, coronas y puentes confeccionados de metal-cerámica o con recubrimiento tipo Veneer de resina.
- Cementación de inlays, onlays, coronas y puentes hechos de resina o cerámica con la condición de que éstos sean adecuados para una cementación convencional.
- Cementación de pines y tornillos siempre que éstos sean adecuados para una cementación convencional.

■ Instrucciones de Uso

Proporción de dispensación: 1 cucharada de polvo y 2 gotas de líquido

Tiempo de trabajo, incluyendo mezcla: 3:30 min.

Tiempo de auto polimerización, desde inicio de la mezcla: 7:00 min.

■ Presentación

Kit

30 g polvo
12 ml. Líquido
1 block mezcla
1 cuchara
Guía Técnica

Kit

15 g polvo
6 ml. líquido
1 block mezcla
1 cuchara
Guía Técnica